



# INSTRUCȚIUNI PENTRU SETURILE PERFUZABILE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

## INDICAȚII DE UTILIZARE

Produsul folosește doar alimentarea prin gravitație și se utilizează la perfuzie.

### Structura principală și proprietățile

- Tubulatura și camera de picurare sunt transparente, putând fi observate ușor;
- Tubulatura este suficient de flexibilă pentru a rezista la răsucire și îndoire;
- Designul dispozitivului de străpungere închisă îl face convenabil pentru manipulare și utilizare;
- Regulatorul de flux poate schimba debitul de la minim la maxim.

### UTILIZARE

- Mai întâi, verificați perioada de valabilitate și integralitatea ambalajului înainte de utilizare;
- Dezlipiți ambalajul la partea tăiată și scoateți setul perfuzabil;
- Închideți regulatorul, scoateți capacul protector al dispozitivului de străpungere închisă și împingeți vârful în locașul de dezinfectare al recipientului cu lichid;
- Așezați recipientul cu lichid cu partea în sus, apăsați pe cameră și jumătate va fi umplută cu soluția perfuzabilă; apoi, deschideți regulatorul pentru eliminarea aerului din tub.
- Penetrați vena în conformitate cu manipularea aseptică după eliminarea aerului și apoi potriviți.
- Observați și apoi schimbați debitul la normal.
- Manipularea perfuziei trebuie realizată de asistente profesioniste pentru montare și supraveghere.
- 20 de picături =  $(1 \pm 0,1)$  ml [ $(1 \pm 0,1)$  g]

### PRECAUȚII

- Poate provoca hipotermie la pacienții slabi;
- Poate provoca ritm anormal ale ventriculelor inimii din cauza debitului rapid;
- Trebuie asigurată supravegherea în timpul perfuziei în cazul unui accident;
- Dispozitivul trebuie să fie steril și apirogen înaintea deschiderii ambalajului;
- Perioada de valabilitate este de cinci ani, nu utilizați dispozitivul dacă este expirat.
- A se arunca după utilizarea unică.

### AVERTISMENTE

- Nu utilizați dacă ambalajul este deschis sau deteriorat sau capacul protector este separat sau lipsesc componente sau se găsesc corpuri străine;
- Dispozitivul trebuie utilizat de către o persoană special pregătită, iar pielea trebuie sterilizată corect.
- Produsele nu pot fi refolosite. Utilizarea repetată poate provoca infectarea încrucișată, chiar și boli grave, precum hepatita, HIV-ul și alte boli infecțioase.

### DEPOZITARE

Produsul trebuie păstrat într-o stare în care umiditatea relativă este mai mică de 80% și trebuie să fie lipsită de gaz coroziv, rece, uscată și cu bună ventilație și curată.

ANU SE REFOLOSI	ANU SE FOLOSI DACĂ AMBALAJUL ESTE DETERIORAT	<b>STERILE</b> STERIL	<b>STERILE EO</b> STERILIZAT CU OXID DE ETILENĂ
<b>MD</b> DISPOZITIV MEDICAL	<b>UDI</b> IDENTIFICATOR UNICAL DISPOZITIVULUI	ATENȚIE	<b>CE</b> 2862
Sistem unic de barieră sterilă	Sistem unic de barieră sterilă cu ambalaj protector pe dinafară	<b>PHT</b> DEHP	CONȚINE sau PREZENȚĂ de FTALAȚI
			REV.: A/0 ÎN VIGOARE: 2022-01-24