



INSTRUCȚIUNI PENTRU SETURILE PERFUZABILE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

INDICAȚII DE UTILIZARE

Produsul folosește doar alimentarea prin gravitație și se utilizează la perfuzie.

Structura principală și proprietățile

- Tubulatura și camera de picurare sunt transparente, putând fi observate ușor;
- Tubulatura este suficient de flexibilă pentru a rezista la răsucire și îndoire;
- Designul dispozitivului de străpungere închisă îl face convenabil pentru manipulare și utilizare;
- Regulatorul de flux poate schimba debitul de la minim la maxim.

UTILIZARE

- Mai întâi, verificați perioada de valabilitate și integralitatea ambalajului înainte de utilizare;
- Dezlipiți ambalajul la partea tăiată și scoateți setul perfuzabil;
- Închideți regulatorul, scoateți capacul protector al dispozitivului de străpungere închisă și împingeți vârful în locașul de dezinfectare al recipientului cu lichid;
- Așezați recipientul cu lichid cu partea în sus, apăsați pe cameră și jumătate va fi umplută cu soluția perfuzabilă; apoi, deschideți regulatorul pentru eliminarea aerului din tub.
- Penetrați vena în conformitate cu manipularea aseptică după eliminarea aerului și apoi potriviți.
- Observați și apoi schimbați debitul la normal.
- Manipularea perfuziei trebuie realizată de asistente profesionale pentru montare și supraveghere.
- 20 de picături = $(1 \pm 0,1)$ ml [$(1 \pm 0,1)$ g]

PRECAUȚII

- Poate provoca hipotermie la pacienții slabi;
- Poate provoca ritm anormal ale ventriculelor inimii din cauza debitului rapid;
- Trebuie asigurată supravegherea în timpul perfuziei în cazul unui accident;
- Dispozitivul trebuie să fie steril și apirogen înaintea deschiderii ambalajului;
- Perioada de valabilitate este de cinci ani, nu utilizați dispozitivul dacă este expirat.
- A se arunca după utilizarea unică.

AVERTISMENTE

- Nu utilizați dacă ambalajul este deschis sau deteriorat sau capacul protector este separat sau lipsesc componente sau se găsesc corpuri străine;
- Dispozitivul trebuie utilizat de către o persoană special pregătită, iar pielea trebuie sterilizată corect.
- Produsele nu pot fi refolosite. Utilizarea repetată poate provoca infectarea încrucișată, chiar și boli grave, precum hepatita, HIV-ul și alte boli infecțioase.
- Aruncați întotdeauna produsele contaminate cu sânge într-un mod conform procedurilor de pericol biologic stabilite.

DEPOZITARE

Produsul trebuie păstrat într-o stare în care umiditatea relativă este mai mică de 80% și trebuie să fie lipsită de gaz coroziv, rece, uscată și cu bună ventilație și curată.

Orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente a statului membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

| | | | |
|--------------------------------|---|---|---|
| ANU SE REFOLOSI | ANU SE FOLOSI DACĂ AMBALAJUL ESTE DETERIORAT | STERILE STERIL | STERILE EO STERILIZAT CU OXID DE ETILENĂ |
| MD DISPOZITIV MEDICAL | UDI IDENTIFICATOR UNICAL DISPOZITIVULUI | ATENȚIE | CE 2862 |
| Sistem unic de barieră sterilă | Sistem unic de barieră sterilă cu ambalaj protector pe dinafară | PHT DEHP CONȚINE sau PREZENȚĂ de FTALAȚI | REV.: B/0 ÎN VIGOARE: 2023-07-10 |